

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Orthofix

Hier erhalten Sie Antworten auf ihre Fragen und Problemstellungen

Sollte eine Problemstellung nicht mit Hilfe des FAQs gelöst werden können, so kontaktieren Sie uns gerne und wir werden Ihnen weiterhelfen!

Bedienung:

Ich möchte, dass die Buchstaben nicht buchstabiert, sondern lautiert werden. Wo kann ich dies einstellen?

Wählen Sie in "Trainings-Konfiguration bearbeiten" --> Reiter "Trainingsablauf" --> Auswahl von "Buchstabieren" in "Lautieren" ändern.

Wie bekomme ich meine eigenen Wortlisten in das Programm?

Bitte lesen Sie dazu im Programm unter Hilfe->Inhalt das entsprechende Kapitel.

Ich möchte mit einem eigenen Wortschatz arbeiten. Wie funktioniert das?

Wählen Sie unter "Wortdatenbank" --> Wortschätze bearbeiten. Erstellen Sie dort als erstes einen neuen Wortschatz und vergeben Sie eine Bezeichnung für diesen Wortschatz. Im nächsten Schritt sehen Sie rechts die enthaltenen Wörter (derzeit leer) und wählen durch "hinzufügen" nun neue Wörter aus, die zu diesem Wortschatz hinzugefügt werden sollen.

Wo kann ich vorab das Orthofix einmal ausprobieren bzw. wo erhalte ich Produktinformationen?

Dazu haben wir mehrere Möglichkeiten geschaffen: zunächst können Sie das Programm von der www.meditech.de aus dem Downloadbereich herunterladen und installieren. Wenn Sie aber keinen Lizenzschlüssel erworben haben, dann wird es zunächst als Demo-Version installiert. Außerdem gibt es ein Video auf YouTube: <http://www.youtube.com/user/MediTECH4uTV> und auch Informationsmaterial zum Programm auf unserer Website.

Bei mir erscheinen immer "Afrika und Kürbis" in der Vorauswahl mit 50%. Wie bekomme ich diese geändert?

Wählen Sie unter "Zusätzliche Testwörter" --> "Katalog zusätzliche Testwörter öffnen" und definieren Sie dort, ob und welche zusätzlichen Testwörter Sie verwenden möchten. Speichern Sie Ihre Einstellung. So arbeiten Sie zukünftig mit Ihren eigenen Testwörtern.

Habe ich die aktuelle Version von Orthofix?

Wählen Sie im Menü "Hilfe" --> "über Orthofix" aus und lesen dort Ihre Version ab, Die Version 2.0.21 ist derzeit aktuell. Sollte Ihre Version nicht aktuell sein, so können Sie unter www.meditech.de die aktuellste Version/ den aktuellsten Patch von Orthofix herunterladen.

Ich habe mein Benutzerhandbuch verlegt. Woher bekomme ich ein neues?

Wählen Sie im Menü "Hilfe" --> "Inhalt". Dort können Sie das Benutzerhandbuch für Orthofix 2.0 einsehen und ausdrucken.

Lizenz:

Nach Neuinstallation ist die Lizenz verloren.

Die Lizenz ist PC-abhängig zugeordnet. Hat der Kunde möglicherweise auf einem neuen Computer installiert? Dann braucht es eine neue Lizenz. (Falls es sich um einen zusätzlichen PC handelt, ist die Zweitlizenz kostenpflichtig.)

