

Liebe Patienten,

- Sie leiden unter Schwindel und Standunsicherheit?
- Sie kommen leicht aus dem Gleichgewicht?
- Ihr Kreislauf fährt ab und zu Karussell, ohne dass Ihr Hausarzt oder Internist eine Ursache feststellen konnte?
- Sie möchten Ihre Koordination- und Konzentrationsfähigkeit verbessern?
- Im Rücken zwickt und zwackt es?
- Ihre Muskulatur ist häufig verspannt?

Nein? Dann gehören Sie zu einer beneidenswerten Gruppe von Patienten. Gratulation.

Wenn Sie aber doch eine oder sogar mehrere Fragen mit **Ja** beantworten, sprechen Sie unser Praxisteam gezielt auf einen Test und das Training mit **MediBalance Pro** an.

In einem umfangreichen Test werden Ihr Gleichgewicht und Ihre Koordination exakt bestimmt. Die Ergebnisse geben uns wertvolle Hinweise, wie Ihnen mit einem speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Training geholfen werden kann.

Wie verläuft der Test?

Der Testablauf besteht aus vier, je etwa 30 Sekunden dauernden Schritten. Ihre Bewegungen in dieser Zeit werden aufgezeichnet und dienen der Auswertung:


- Schritt 1: Sie stehen entspannt und ruhig mit beiden Füßen auf einer Testplatte.
- Schritt 2: Sie schließen auf der Platte stehend die Augen.
- Schritt 3: Sie stehen auf der Testplatte. Der Untergrund wird durch ein zusätzlich dazwischenliegendes Spezialkissen bewusst leicht beweglich gestaltet.
- Schritt 4: Sie schließen zusätzlich wiederum die Augen.

Wie verläuft das Training?


Abhängig von Ihren Bedürfnissen entscheidet Ihr behandelnder Facharzt, welche konkreten Trainingschritte für Sie besonders gut geeignet sind. So erhalten Sie ein individuelles Training zur Verbesserung Ihrer Stand- und Gangsicherheit.

Über einen Computermonitor werden Ihnen Aufgaben gestellt.

Beispielaufgabe: Sie legen einen beweglichen, virtuellen Ball gezielt auf einen bestimmten Punkt oder schieben ihn abwechselnd in andere Felder.

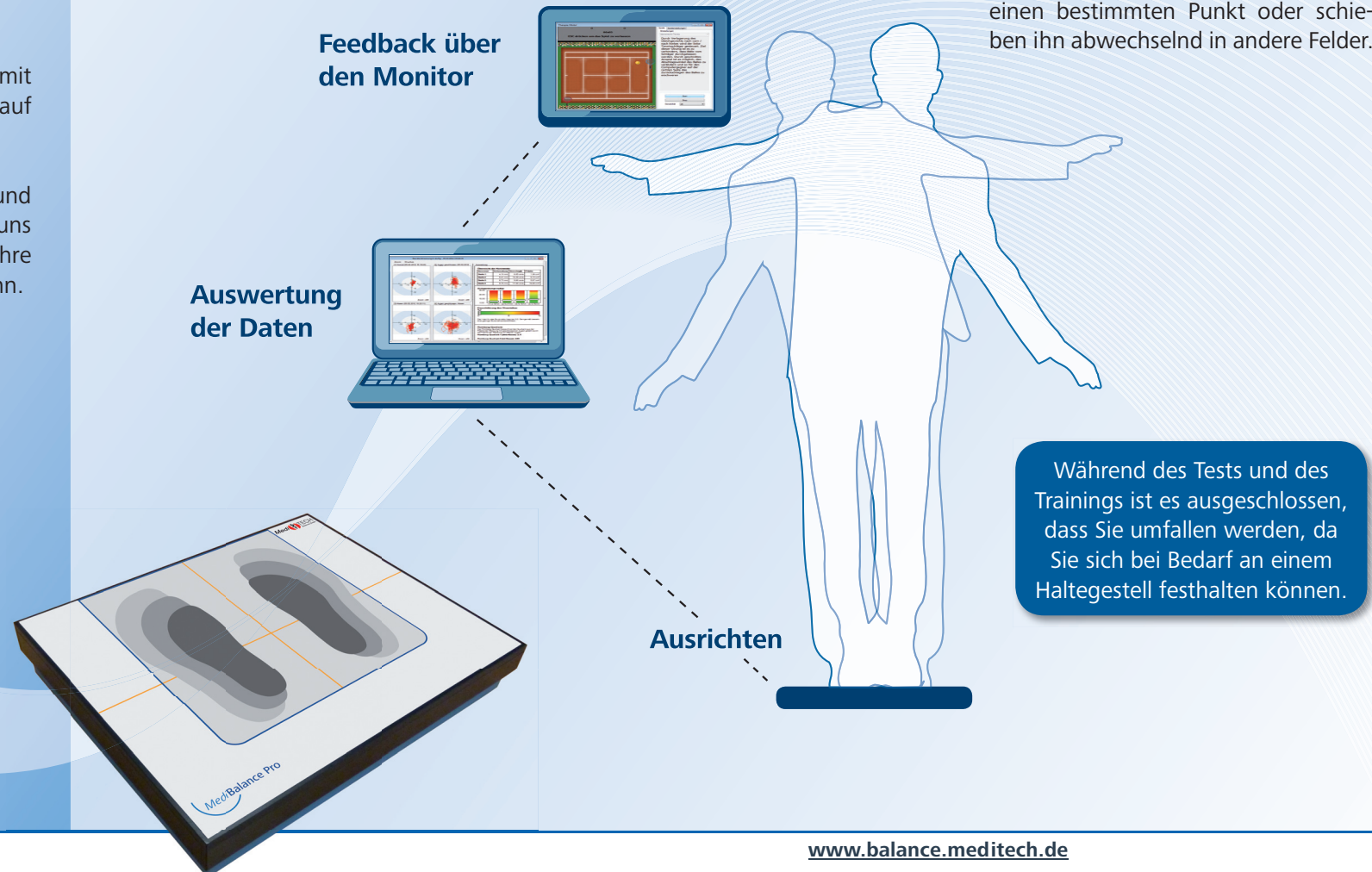

MediBalance Pro – Eine Testsituation

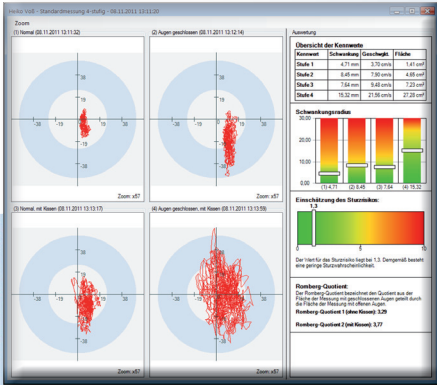

MediBalance Pro in Kürze

MediBalance Pro bietet einen exakten Test von Gleichgewicht/Koordination und ein darauf und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Training.

MediBalance Pro unterstützt Sie wirksam bei

- Standunsicherheit und Schwindel
- Gleichgewichts- und Kreislaufproblemen
- Koordinations- und Konzentrationsstörungen
- Optimierung des Gleichgewichts im (Leistungs-)Sport
- Rücken- und Verspannungsschmerzen

Zögern Sie nicht, das Praxisteam auf diese Methode gezielt anzusprechen. Wir werden Sie gern beraten und den Test mit Ihnen durchführen, wenn Sie es wünschen.

Ihre Fachpraxis

Medi  **TECH**
Electronic GmbH

www.balance.meditech.de

S120 – MediBalancePro-Patientenflyer – V03 – 19.03.2012



Medi  **TECH**
Electronic GmbH

Schwindel? Kein Thema mehr ...

Diagnose- und
Behandlungsmöglichkeiten



MediBalance Pro